



Realism

写实派全瓷烤瓷粉

 爱尔创

写实派釉膏

- 色彩丰富 均匀
- 颗粒细腻 操作简单
- 低温烧制 应用广泛
- 自主研发 工艺稳定



适用材料


氧化锆、玻璃陶瓷、烤瓷

产品明细和用途类别

基础色						
	BASE A	BASE B	BASE C	BASE D		
切端色						
	BASE 0	GREY	GREY BLACK	BLUE	BLUE GREY	
窝沟色						
	ORANGE	BROWN	REDDISH BROWN			
调整色						
	BLACK	WHITE	YELLOW	PURPLE	OLIVE YELLOW	OLIVE GREEN
牙龈色						
	PINK	DARK PINK				
透明色						
	GLAZE	GLAZE FLUO				



修复体预备

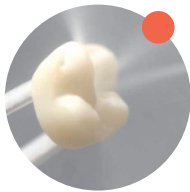

修复体表面喷砂

氧化锆: 50微米氧化铝砂, 2-2.5bar压力

玻璃陶瓷: 50微米氧化铝砂, 1-1.5bar压力

超声震荡:180秒



烧结曲线

三单位以下桥体和单冠外染烧结曲线

起始温度 (°C)	预热时间 (min)	干燥时间 (min)	升温速率 (°C/min)	烧结温度 (°C)	停留时间 (min)	降温速率 (°C/min)	开盖温度 (°C)
500	4:00	4:00	45	760-830	1:00	45	500

三单位以上桥体外染烧结曲线

起始温度 (°C)	预热时间 (min)	干燥时间 (min)	升温速率 (°C/min)	烧结温度 (°C)	停留时间 (min)	降温速率 (°C/min)	开盖温度 (°C)
400	4:00	4:00	30	760-830	1:00	30	400

注：

- 1、升温速率和降温速率取决于修复体单位，修复体单位越多升温 and 降温速度要越慢，否则牙桥隐裂、断裂风险提高。
- 2、二次进炉烧结温度建议降低10℃。
- 3、烤瓷炉需定期维护和温度校准，以保证烧结温度设置合理（烤瓷炉长期使用实际炉温与程序炉温存在一定温差）。

国瓷材料 股票代码: 300285

国瓷·爱尔创

值得信赖的材料专家

深圳爱尔创口腔技术有限公司

Shenzhen Upcera Dental Technology Co., Ltd.

E-mail: services@upcera.com

网址: www.upcera.com



客服热线

400-6785005



官方公众号